Pro-care Auto

Superficie Especial de Manejo de Presión










Pro-care Auto

Superficie Especial de Manejo de Presión

El nuevo Pro-care Auto es la SEMP Apex recomendada para uso socio-sanitario y hospitalario. Cubre prácticamente todo tipo de situaciones en el campo de las UPPs: desde pacientes con riesgo de aparición de úlceras por presión (de bajo a muy alto), hasta aquellos que ya se encuentran bajo tratamiento (con UPPs desde grado I hasta grado IV).

El ajuste de presión en el Pro-care Auto es excelente gracias a los sensores que permiten un ajuste automático y óptimo de las presiones en pacientes de 40 a 250 kilos.

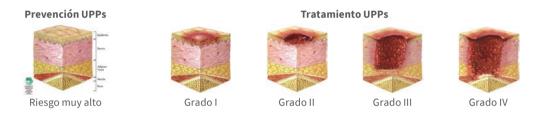


El Pro-care Auto es un colchón de reemplazo con tres tipos de terapia:

Terapia de presión alternante: las celdas individuales se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 10, 15, 20 o 25 minutos.

Terapia de baja presión alternante: las celdas individuales se inflan y desinflan a una presión más baja en comparación con la terapia de presión alternante. Proporcionando así una liberación de presión periódica y evitar una presión prolongada en el paciente.

Terapia de baja presión continua: provoca la inmersión del paciente en la superficie, al reducir 2/3 la presión.

Para un mayor confort, este equipo permite ajustar el nivel de presión a gusto del paciente 🐠. Dispone de 4 alarmas visuales y sonoras silenciables 💓 que indican fallo eléctrico 🔾, avería 🎢, baja presión 🔾 y alta presión.Incorpora la función Máxima Firmeza 💵 que facilita el reposicionamiento y las transferencias del paciente. Después de 20 minutos, vuelve a la función anteriormente determinada. Para una mayor seguridad, es posible bloquear el panel de control 🕤.

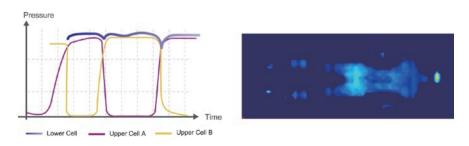




Celdas Qubicell ™: Celdas patentadas Apex fabricadas en poliuretano para reducir la fricción y con forma rectangular para una mejor redistribución de la presión en la zona del sacro. Máxima eficacia terapéutica, gracias a la altura de sus 20 celdas (20,32 cm). Tecnología celda sobre celda que favorece la inmersión y protege al paciente en caso de fallo eléctrico. Fácil limpieza al no incluir foam.





Tecnología Heel Relief: Eliminan por completo la presión ejercida sobre los talones al cancelar la celda correspondiente.

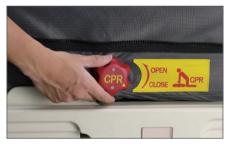

CPR: Visible y de fácil uso que facilita la reanimación en caso de parada cardiorespiratoria. Permite un rápido desinflado en caso de emergencia.

Eficacia terapéutica:



Alivio de Presión: Excelente. Ajuste óptimo de la presión de forma automática. Las celdas Qubicell ™, con forma rectangular en la zona del sacro, redistribuyen óptimamente la presión. Dispone de tres terapias (alternante y baja presión alternante y baja presión continua) y un mayor número y altura de celdas (20 celdas de 20,32 cm de altura) que favorecen la inmersión.



Gestión del Microclima: Excelente. Su funda bidireccional de Poliéster es resistente al agua y permeable al vapor. El colchón dispone de un novedoso sistema de ventilación de micro baja perdida de aire para reducir la maceración de la piel.



Reducción de la Fricción: Muy alta. La funda bidireccional fabricada en poliéster, se adapta al cuerpo



Micro Baja Perdida de Aire: Gracias a su novedoso sistema de ventilación, ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad.











Flore Potendari

Funda bidireccional de Poliéster: Permeable al vapor, resistente al agua, retardante al fuego y con cremallera bidireccional.





Modo transporte y almacenaje: Conector Apex que impide la salida del aire durante los traslados hasta 12 horas. Cuenta con cinchas para almacenar el colchón.



Fácil de limpiar: Este equipo permite ser desmontado fácilmente para su descontaminación gracias a sus celdas extraíble y su base desmontable.

del paciente reduciendo la fricción. Las celdas Qubicell ™ están fabricadas en poliuretano.



Seguridad del paciente: Muy Alta. Incorpora 4 alarmas y es posible bloquear el panel de control. Las celdas de la base, protegen al paciente en caso de fallo eléctrico. CPR profesional.



Peso máximo soportado: 250 kg.

Descripción de producto	Referencia
Pro-care Auto	0103040-85
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	57 x 43 x 58 cm
Peso total de la caja	17,3 kg

Especificaciones del colchón	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	200 x 85 x 20,32 cm
Peso	10 kg
Celdas	20 celdas independientes de TPU de 20,32 cm
Zona estática en la cabeza	3 celdas
Celdas centrales	12 celdas. 4 de ellas Qubicell
Celdas Heel-Relief	5 celdas
Base	Antideslizante de Nylon PU
CPR	Sí. Profesional
Guía para cable	Sí
Cinchas de ajuste al somier	Sí
Modo almacenaje	Sí
Certificados	Retardante al fuego
Garantía	2 años

Especificaciones de la funda	
Material	Poliéster bidireccional
Cierre	Cremallera bi-direccional
Resistente al agua	Sí
Permeable al vapor	Sí
Protocolo de limpieza	THE PO
Certificaciones	REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 5

Especificaciones del compresor		
Dimensiones (largo x ancho x alto)	34 x 13,5 x 20,5 cm	
Peso	3,8 kg	
Voltaje	AC 220-240V, 50 Hz	
Máxima salida de aire	8 litros/min x 2	
Ajuste de rango de presión	Automático	
Duración del ciclo alternante	10, 15, 20 y 25 min.	
Terapias	Alternante, baja presión alternante y baja presión continua	
Funciones	Máxima firmeza, bloqueo de panel presionando 3 segundos (bloqueo automático si en 5 minutos no hay actividad) y silenciar alarma (después de 3 minutos la alarma por baja presión se vuelve a activar)	
Alarma	4 (fallo eléctrico, avería, baja presión y alta presión)	
Nivel sonoro	<20 dBA	
Botón encendido y apagado	Sí	
Modo transporte	Sí	
Colgadores	Sí	
Filtro y fusible	Sí, externos	
Carcasa	ABS retardante al fuego	
Certificados	Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21	
Garantía	2 años	

Apex Medical - Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain T +34 94 4706408 info@apexmedical.es











